

Diatermi UES-40 Olympus Kirurgoperation

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Användnings- område | På Endo Alpha stapeln som används av kirurgen och transplantation. Vid laparoscopi och Endo Alpha 2 vid öppna gall- samt TEM op. |
| Funktion | Efter att programmet för stapeln valts så programmeras diatermin automatiskt. Laparoscopisk, bipolär och monopolär funktion. |
| Manual/ Bruksanvisning | Kort bruksanvisningen sitter på stapeln. Bruksanvisningen finns hos medicinteknisk ansvarig sjuksköterska. |
| Tillbehör | Neutralplatta, 3M. Elkabel till laparoscopiska instrument. Elkabel, trigger, till engångs sax, depån F5-2. Bipolärt handtag + elkabel flergångs, skåp 35 Monopolärt vanligt diatermihandtag. Trampa MAJ-1258 med gula och blå pedaler. |
| Förberedelse/ Funktionskontroll | Automatisk funktionskontroll: Apparaten går igenom och detekterar om det finns några fel. Akustiska signaler och indikeringslampa ovanför respektive funktion måste alltid ljuda och lysa när en funktion aktiveras. Manuell funktionskontroll, ställ in önskat förprogrammerat program automatiskt. |
| Hygien/rengöring | Nätkontakten tas ur. Följ Kirurgoperations lokala hygienföreskrifter. Våttorknings desinfektion, fukt får inte tränga in i Diatermin, om det finns brännbara ämnen i desinfektionsmedlet, låt det dunsta innan du startar upp apparaten. Fottrampen får ej sänkas ner i vätska endast torkas med desinfektionsmedel. |
| Dokumentation | Vid problem skriv en avvikelser i Medcontrol. |
| Observandum/ Handlingsberedskap | Koppla in neutralplattan, kontrollera huden där plattan ska sitta. Observera, om neutralplattan inte lyser grönt, massera med Natriumklorid på en kompress där plattan ska sitta. Då får du kontakt mellan neutralplattan och patienten. Notera att kablarna är hela och att kablarna inte får komma i kontakt med patienten. EKG-elektroden ska appliceras minst 15 cm från operationsområdet. Varning för antändbara gaser och vätskor. Spray får under inga förhållanden användas mot peang, pincett. Kontrollera alltid instrumentets isolering. Följ alltid socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2001:12. |

Kontrollera att rätt program är inställt till operationen.
Apparaten är kompatibel med övrig utrustning.
Vid fel, Error och siffra. Skriv upp och meddela Medicinteknisk ansvarig.
Stäng av och starta upp igen
Extra diatermi i passagen. ERBE ICC 350.

Handhavande/ Användarkrav

Funktionskontroll: Sjuksköterska, undersköterska.
Iordningställande: Sjuksköterska, undersköterska.
Användande: Kirurg.
Apparatansvarig: Verksamhetschef.
Förebyggande underhåll: När/se dekal på apparat.

Utbildning

Utbildnings- och medicinteknisk sjuksköterska.

Placering/ Arbetsmiljö

Endo Alpha-stapeln, apparat finns inne på op-sal 1, 101-huset, används tillsammans med utsuget på insufflatorn som kopplas med en operationssug med laparoscopifilter.

Service och förebyggande underhåll

Funktionsunderhåll görs av MIT, medicinsk informatik och teknik, telefonnummer 133 33. En gång/år. Vid behov av Olympus.

Lokala föreskrifter

Kablar med banankontakter får inte användas på Akademiska sjukhuset.
Använd diatermi påse och hylsa för att minimera risken för brännskador på patient och personal.

Diatermi UES-40


Stapel 999999020

Tillbehör:

Trampa med gula och blå pedaler

För att få lika bild på båda monitorerna så kopplas på Endo Alpha en grov svart kabel ihop staplarna.

HD2 kopplas sladd från monitor till monitor.

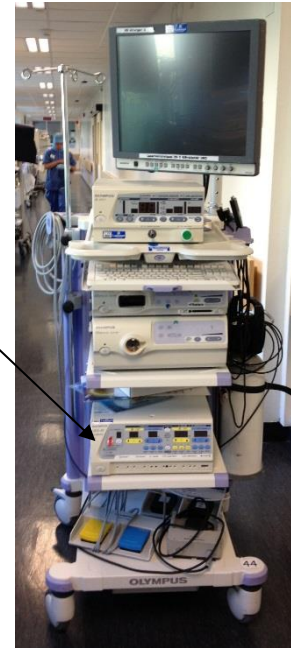

Reviderat: Weronica Roos 210828

Diatermi UES-40 Olympus Kirurgoperation

Sidan 3 av 3

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-10519

Version: 2.0

Handlingstyp: Instruktion/Rutin