

Rutin för användande av C-bågen på Ortopedakuten rum 403

Bakgrund:

Rutin för att använda C-bågen och för att lagra bilder till PACS och VueMotion.


KORTMANUAL C-BÅGE LAGRING AV BILDER

1. Starta C-bågen och logga in på apps med lösenord apps.
2. Starta den bärbara datorn, logga in på funk0094, lösenord ambulansen.
3. Klicka på den vita ikonerna mitt på skrivbordet ("BUD").
4. Skriv in Patientdata och klicka på "BOKA". Ändra ingen modalitet.
5. Starta körningen i c-bågen gm att trycka "Perform"
6. Få in patientdata till c-bågen gm att trycka på "Update patient"
7. Tryck på "Query" för att ladda ner aktuell patient.
8. Välj patient – tryck "Perform"
9. Ta de bilder du behöver.
10. Tryck "Review" och klicka på de bilder du vill spara.
11. Tryck på "Send to DICOM".


Resten gör du på c-bågen

För att bilderna ska märkas med patient-id behöver du hämta patientens data till c-bågen, gör så här:


- Tryck "Perform" för att förbereda körningen.

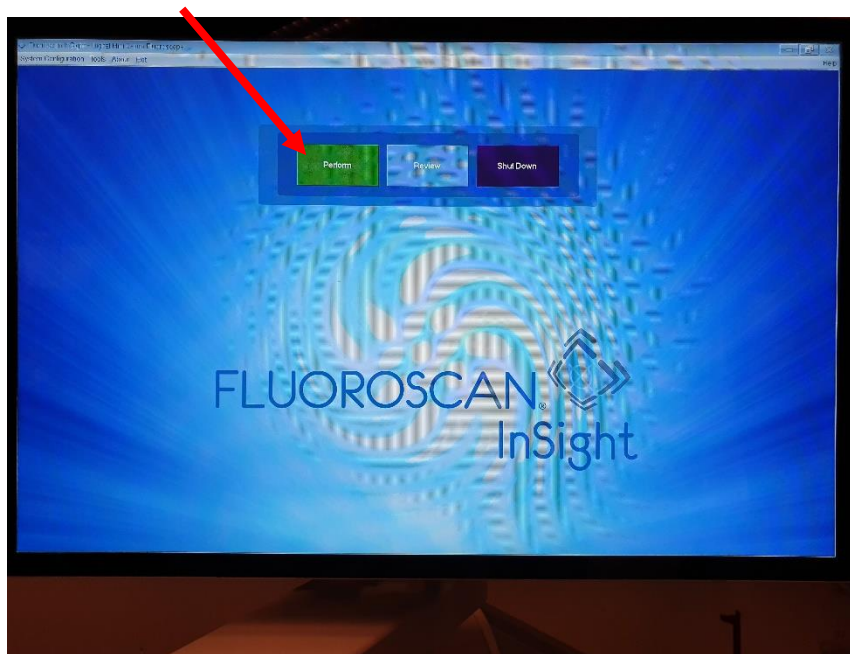

-Tryck på "Update Patient" på c-bågens touch-skärm.

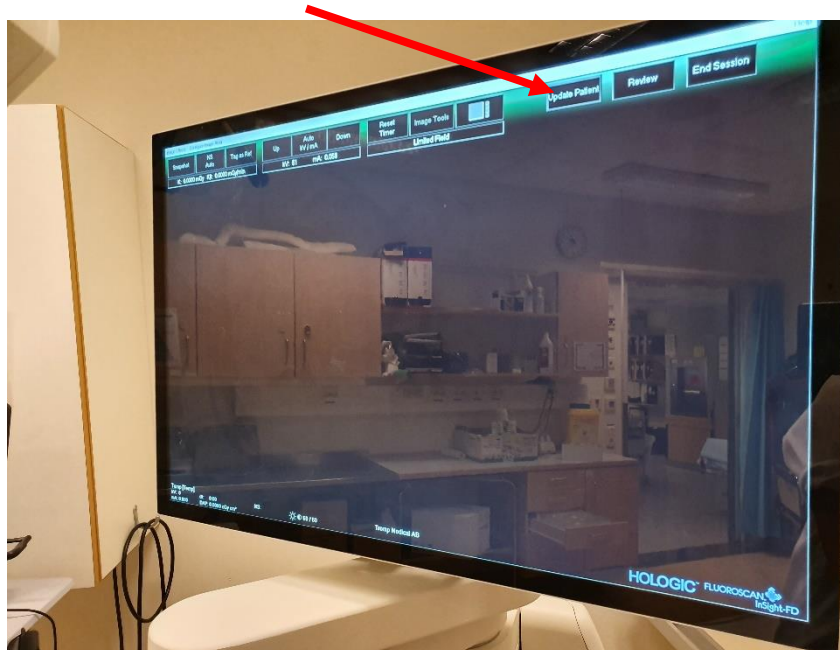


- Tryck på Query för att ladda in patientdata. Vänta medan listan laddas.

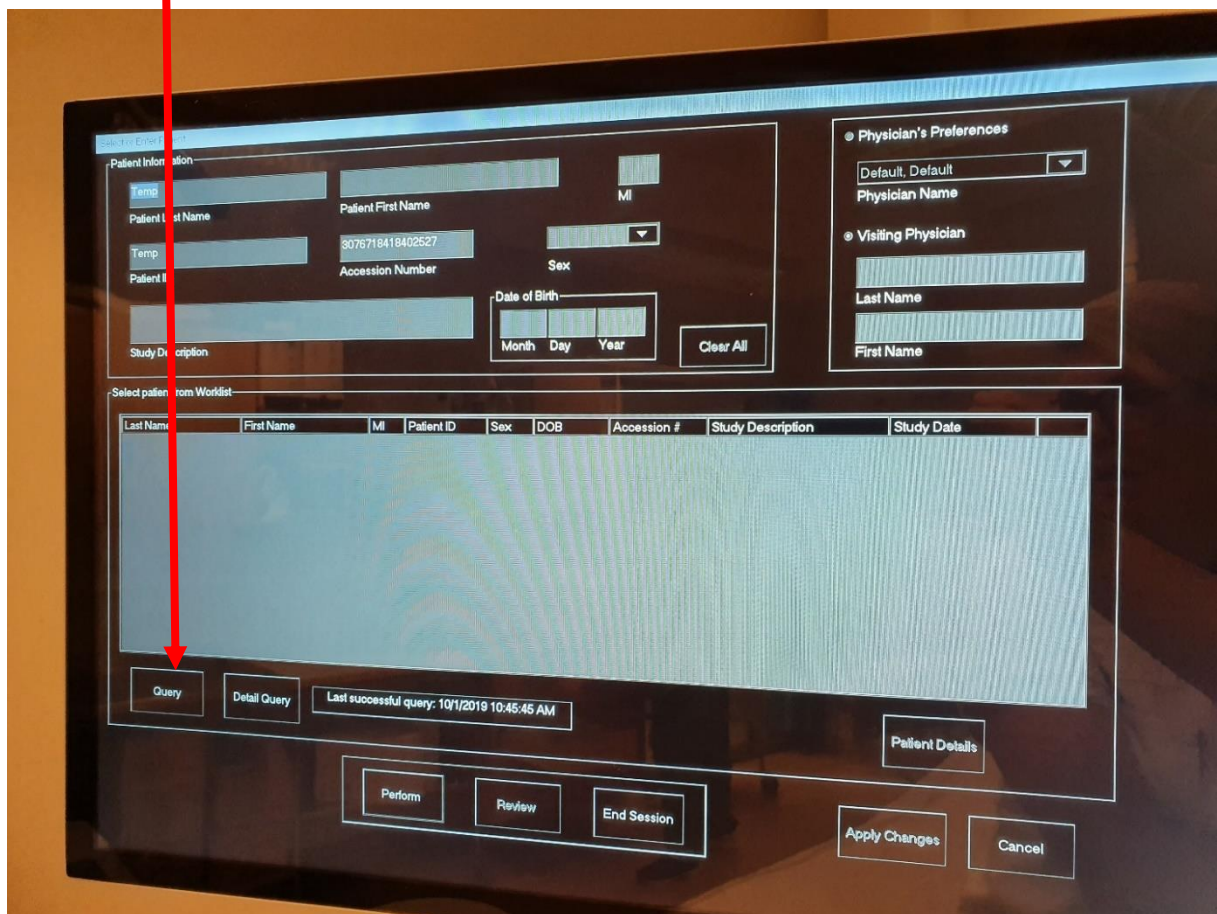

- Välj sedan patienten i listan – använd tangentbordets mus eller touch-skärmen.


- Tryck "Perform" för att märka bilderna med patient-id (patientdata syns inte förrän bilden är tagen).

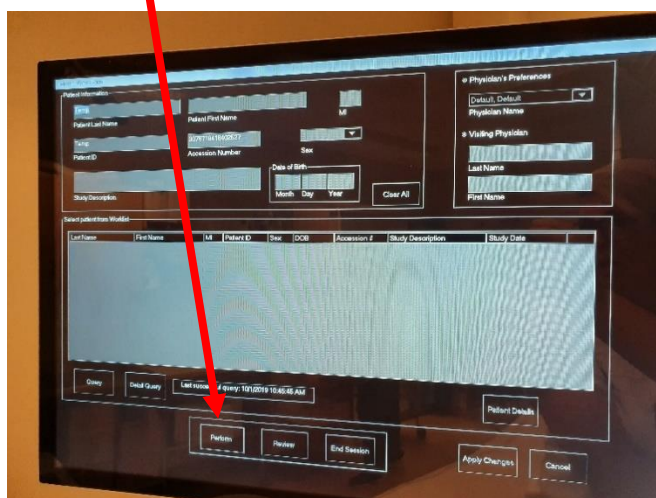

- Ställ in c-bågen för aktuell bild. Tryck på den trådlösa pedalen eller manöverbordet för att ta bilden.

För att lagra bilderna till röntgenprogrammet:

-Tryck Review

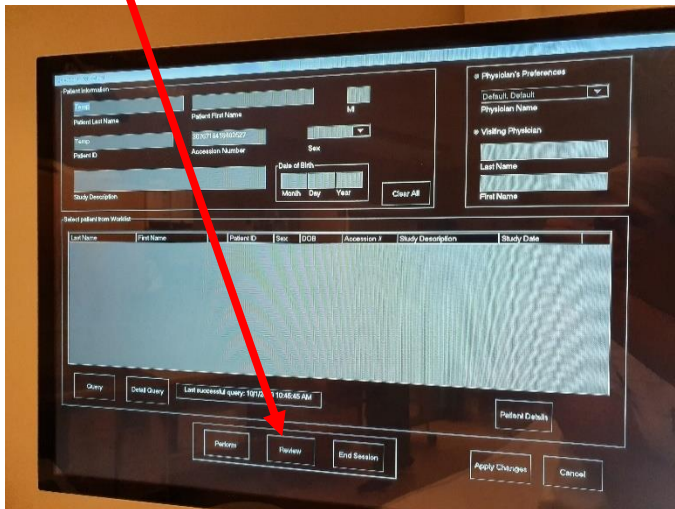

- Välj de bilder du vill spara genom att klicka på touch-skärmen.

- Tryck på "Send to DICOM" i nedre listen.

KLART!

Fyll i loggboken för genomlysning som ligger på vänster sida av apparaten, innanför luckan.

